



Modernisierung in der flüssigkeitsbasierten Zytologie / LBC – Umstellung auf ein neues System

Wir stellen das System für die Analytik der gynäkologischen Zytologie von BD SurePath™ auf ThinPrep® von Hologic um. Mit dieser Umstellung wird die Analytik modernisiert und professionalisiert: Die zytologischen Präparate werden künftig mit Hilfe künstlicher Intelligenz anhand hochaufgelöster digitaler Bilder an speziell dafür ausgelegten Computer-Bildschirmen anstatt am Mikroskop beurteilt. Damit wird der Austausch zwischen den Zytotechnikerinnen / Zytotechnikern und der Pathologie vereinfacht.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Es stehen Ihnen drei Entnahmegeräte zur Verfügung: M319, M325, M329
- Das Bürstchen muss unmittelbar nach der Probenentnahme in der Flüssigkeit ausgespült werden.
- Der Bürstenkopf muss unmittelbar **nach dem Ausspülen vom Probengefäss entfernt** werden. Ansonsten verkleben die Zellen zu einem Klumpen.
- Bei elektronischer Auftragserfassung muss eine **Online-Request-Etikette auf dem Probengefäss** angebracht werden. Diese können kostenlos über den Webshop (Art. M9505) bezogen werden.
- Von der **Verwendung von Gleitmittel** wird **abgeraten**. Das wasserlösliche Gleitmittel K-Y (Art. M930450) kann jedoch verwendet werden.
- Das Material von **BD SurePath™ kann bis zum 15.10.2022 verwendet werden**. Nach diesem Datum bitte nur noch das ThinPrep®-Material verwenden. Bitte entsorgen Sie das alte Material von BD SurePath™ (Rückgabe nicht möglich).

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:

www.team-w.ch/news

Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.

Herzliche Grüsse

labor team w ag

labor team w ag
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach

T 071 844 45 45
F 071 844 45 46
info@team-w.ch

Ich möchte den MaxFax in Zukunft per Mail als Newsletter erhalten.

E-Mail-Adresse: _____

Arztcode: _____

Ich möchte den MaxFax in Zukunft nicht mehr erhalten.

Faxnummer: _____

Arztcode: _____