

## eSwab™




### Material

**Links:** Probenröhrchen mit Amies Medium

**Rechts:** Tupfer



1. Öffnen im markierten Bereich.

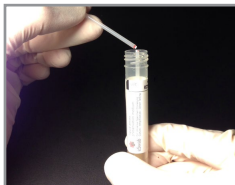


2. Tupfer nach Probenahme zurück ins Probenröhrchen stecken und bei farbig markierter Stelle abbrechen.



3. Probenröhrchen mit Deckel schliessen und mit Patientendaten beschriften.



4. Medium nicht ausleeren.

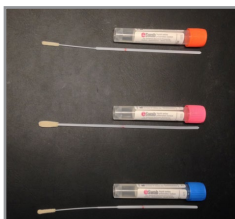

**M513** Auge, Ohren, Urogenitalbereich

**M512** Vagina, Wunde

**M514** Nasen-Rachen-Raum



**Material bis zum Versand bei Raumtemperatur aufbewahren.**